

PERNEIRA EM BOTAS AUTOMÁTICA

REGISTRO ANVISA: 80251149002

COMPOSIÇÃO

COMPONENTES:

MANOPLA - AÇO INOXIDÁVEL AISI 304

BOTA – POLIETILENO INJETADO E REVESTIMENTO EM COURINO COM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE

MORSA – ALUMÍNIO ANODIZADO

MANÍPULO DA MORSA – ALUMÍNIO ANODIZADO

HASTE – ALUMÍNIO ANODIZADO

ARTICULAÇÃO – ALUMÍNIO ANODIZADO

EIXO DA ARTICULAÇÃO – AÇO INOXIDÁVEL AISI 304

MANÍPULO DO ADAPTADOR - AÇO INOXIDÁVEL AISI 304

ADAPTADOR – AÇO INOXIDÁVEL AISI 304

MOVIMENTO	360º
CAPACIDADE	ATÉ 20 KG HASTE POSIÇÃO DISTAL
PESO TOTAL LÍQUIDO	10 KG (PAR)
PESO TOTAL BRUTO	13 KG (COM ADAPTADOR)
NÚMERO DE EMBALAGENS	01 UNIDADE
TIPO DE EMBALAGEM	CAIXA DE PAPELÃO
DIMENSÕES DA EMBALAGEM	98 CM X 34 CM X 51 CM (COMPRIMENTO X ALTURA X LARGURA)

DIMENSÕES DO PRODUTO:

PERNEIRA 95 CM X 25 CM (ALTURA X LARGURA)

ADAPTADOR 09 CM X 08 CM X 12 CM (COMPRIMENTO X ALTURA X LARGURA)

VALIDADE

INDETERMINADO

MODELO

AI2013 – 1 PAR DE PERNEIRA

AI2020 – 1 PAR DE ADAPTADOR (ACESSÓRIO DE USO EXCLUSIVO)

INDICAÇÃO E FINALIDADE DE USO

A PERNEIRA É INDICADA PARA POSICIONAR AS PERNAS DO PACIENTE COM CONFORTO E PROTEÇÃO PREVENINDO PROBLEMAS CAUSADOS PELO MAU POSICIONAMENTO DAS PERNAS DURANTE O ATO CIRÚRGICO.

TEM COMO FINALIDADE O REPOSICIONAMENTO DO PACIENTE DURANTE A CIRURGIA SEM A NECESSIDADE DE RETIRAR OS CAMPOS CIRÚRGICOS EVITANDO CONTAMINAÇÃO DURANTE O ATO CIRÚRGICO.

PRECAUÇÕES, RESTRIÇÕES, ADVERTÊNCIAS, CUIDADOS ESPECIAIS E ESCLARECIMENTOS SOBRE O USO DO PRODUTO

- ✓ TÉCNICAS DE ASSEPSIA ANTES DA ENTRADA NO CENTRO CIRÚRGICO DEVEM SER EMPREGADAS;
- ✓ PRODUTO NÃO ESTÉRIL;
- ✓ A DURABILIDADE É ATÉ QUE O EQUIPAMENTO SE MANTENHA COMO FOI PROJETADO SEM QUAISQUER MODIFICAÇÕES;
- ✓ MANTENHA O PRODUTO LIMPO E DESINFETADO.



FICHA TÉCNICA

CUIDADOS ADICIONAIS COM O PRODUTO INCLUEM:

- ✓ NÃO BATER OU AMASSAR O PRODUTO, POIS PODE COMPROMETER O USO;
- ✓ TESTAR O PRODUTO ANTES DE SER UTILIZADO;
- ✓ SOMENTE MANUSEAR O EQUIPAMENTO, PESSOAS APTAS PARA O USO;
- ✓ PRAZO DE GARANTIA DE 01 ANO PARA PROBLEMAS TÉCNICOS E/OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.

EFEITOS ADVERSOS

NÃO SÃO RELATADOS EFEITOS ADVERSOS AO USO DESTES PRODUTOS.

CUIDADOS DE ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

O PRODUTO DEVE SER TRANSPORTADO E CONSERVADO EM LOCAL LIMPO, AREJADO, PROTEGIDO DE LUZ SOLAR, FONTES DE CALOR E UMIDADE. COMO RECOMENDAÇÃO GERAL É ESPECIFICADO MANTER-SE ENTRE 15°C E 45°C DE TEMPERATURA E ENTRE 40% À 75% DE UMIDADE RELATIVA.

FORMAS DE APRESENTAÇÃO DO PRODUTO

CADA CAIXA CONTÉM:

1 PAR DE PERNEIRA

1 PAR DE ADAPTADOR (ACESSÓRIO DE USO EXCLUSIVO)

COMPATIBILIDADE COM OUTROS PRODUTOS:

COMPATIBILIDADE COM MESAS CIRÚRGICAS QUE CONTENHA RÉGUA DE APOIO PARA PERNEIRA TAIS COMO:

MESA ALTA CIRURGIA RADIOTRANSARENTE SERIE ATENA MODELOS A-500, A-600 E A-900
REG. ANVISA: 10345500050

MESA ORTOPEDICA CIRURGICA RADIOLOGICA MERCEDES IMEC, MODELO: MI-2112 RX,
MARCA MERCEDES IMEC - REG. ANVISA: 10091160004

MÉTODO DE LIMPEZA RECOMENDADO:

LIMPEZA

NAS PARTES METÁLICAS E CORINO COM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE PROCEDER A LIMPEZA COM ÁLCOOL;

NAS DEMAIS PARTES PROCEDER A LIMPEZA COM PANO UMIDECIDO;

NÃO UTILIZAR OUTROS PRODUTOS QUÍMICOS NA LIMPEZA PARA EVITAR RISCOS DE CORROSÃO OU MANCHAS;

APÓS A LIMPEZA DEVE-SE FAZER A DESINFECÇÃO DO PRODUTO.

DESINFECÇÃO

REALIZA-SE A ASSEPSIA HABITUAL AGRESCIDA DE UM GERMICIDA OU PRODUTO DESINFETANTE DE LARGO ESPECTRO, TOMANDO-SE O CUIDADO DE NÃO DEIXAR RESÍDUOS QUE POSSAM PROVOCAR QUALQUER AÇÃO TÓXICA AO ENTRAR EM CONTATO COM O PACIENTE.

MANTENHA O PRODUTO LIMPO E DESINFETADO PARA A UTILIZAÇÃO.

NÃO UTILIZAR OUTROS PRODUTOS QUÍMICOS NA LIMPEZA, QUE NÃO SEJA ÁLCOOL NA PARTE METÁLICA E, PANO UMIDECIDO NAS DEMAIS PARTES.

NÃO PERMITA QUE LÍQUIDOS SEJAM INSERIDOS NO PRODUTO.

REQUISITOS DE MANUTENÇÃO:

A MANUTENÇÃO PREVENTIVA DEVERÁ SER REALIZADA EXCLUSIVAMENTE PELA ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA (CREDENCIADA PELA FABRICANTE) A CADA 12 (DOZE) MESES.



FICHA TÉCNICA

PRAZO DE GARANTIA DE 01 (UM) ANO PARA PROBLEMAS TÉCNICOS E/OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.

REQUISITOS DE INFRA-ESTRUTURA:

ESTE ACESSÓRIO TEM COMO FINALIDADE O USO EM MESAS CIRÚRGICAS JUNTAMENTE COM O ADAPTADOR UNIVERSAL, É POSSÍVEL EVITAR OS PROBLEMAS CAUSADOS PELO MAU POSICIONAMENTO DO PACIENTE, TAIS COMO: DORES NOS MEMBROS NO PÓS-OPERATÓRIO E COMPLICAÇÕES CIRCULATÓRIAS, ENTRE OUTROS.

CONDIÇÕES DE MANIPULAÇÃO DO PRODUTO:

POSICIONAR O PACIENTE NA POSIÇÃO ADEQUADA, CONFORME ORIENTAÇÃO MÉDICA. PARA ISSO, SIGA O SEGUINTE PROCEDIMENTO:

- INSERIR ADAPTADOR NA RÉGUA DA MESA CIRÚRGICA
- ABRIR TRAVA DE SEGURANÇA DO ADAPTADOR UNIVERSAL
- FIXAR O ADAPTADOR NA RÉGUA E TRAVAR COM TRAVA DE SEGURANÇA
- COLOCAR EIXO DE ARTICULAÇÃO NO ADAPTADOR COM A PARTE DO JOELHO VOLTADO PARA FRENTE DA MESA CIRÚRGICA
- ABRIR O MANÍPULO DO ADAPTADOR NA DIREÇÃO ANTI-HORÁRIA
- COLOCAR O EIXO DA ARTICULAÇÃO COM A FENDA VOLTADA PARA FORA
- APERTAR O MANÍPULO DO ADAPTADOR NA DIREÇÃO HORÁRIA
- POSICIONAR COM O AUXÍLIO DA MANOPLA A HASTE NA POSIÇÃO ZERO
- AJUSTAR AS BOTAS ATRAVÉS DO MANÍPULO DA MORSÀ EM RELAÇÃO A HASTE DA PERNEIRA
- ABRIR MANÍPULO DA MORSÀ ATÉ SOLTAR A MORSÀ (NOTE QUE A BOTA FICARÁ SOLTA)
- COLOQUE A BOTA NA POSIÇÃO DESEJADA
- TRAVAR MANÍPULO DA MORSÀ

ESTE PRODUTO DEVE SER UTILIZADO APENAS POR PESSOAL ADEQUADAMENTE TREINADO E SOB A DIREÇÃO DE EQUIPE MÉDICA QUALIFICADA, FAMILIARIZADA COM OS RISCOS E BENEFÍCIOS ATUALMENTE CONHECIDOS DA UTILIZAÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA MESAS CIRÚRGICAS.

CUIDADOS COM RELAÇÃO AO POSICIONAMENTO DO PACIENTE SOBRE AS PARTES DO ACESSÓRIO.

FABRICANTE

AMERICAN INSTRUMENTS EIRELI - EPP
ENDEREÇO: AVENIDA 53, 1227 – JARDIM KENNEDY
CEP: 13501-530 – RIO CLARO/ SP
FONE: (19)3531-5100. FAX (19)3531-5109.
CNPJ 06.981.398/0001-21. INDÚSTRIA BRASILEIRA.
AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO K956X0779300
RESPONSÁVEL TÉCNICO: PRISCILA A. BISCARO - CRQ: 04200899