

SOLUÇÃO DESEMBAÇANTE – ENDO FOG SACHÊ

REGISTRO ANVISA: 80251140039

COMPOSIÇÃO

PRODUTO UMEDECIDO EM LENÇO COM 3mL DO LÍQUIDO É COLOCADO DENTRO DE UMA EMBALAGEM INDIVIDUAL TIPO ENVELOPE, MANUFATURADO COM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME LAMINADO DE POLIÉSTER/ POLIPROPILENO, QUE POSSIBILITA A ABERTURA ASSÉPTICA SEM RASGOS NO FILME COM MENOR LIBERAÇÃO DE FIBRAS.

VALIDADE

12 MESES APÓS A DATA DE ESTERILIZAÇÃO.

MODELO

AI0032

INDICAÇÃO E FINALIDADE DE USO

ENDO FOG É UMA SOLUÇÃO AQUOSA, SEM COLORAÇÃO E ESTÉRIL, CUJA FINALIDADE É A DE MINIMIZAR O EMBACAMENTO E REDUZIR A ESTÁTICA DAS LENTES DE ÓTICAS DURANTE PROCEDIMENTOS DE VIDEOCIRURGIAS. O PRODUTO POSSUI FORMULAÇÃO SEGURA, PORTANTO NÃO DANIFICA AS LENTES DE ÓTICAS DURANTE PROCEDIMENTOS DE VIDEOCIRURGIAS. O PRODUTO POSSUI FORMULAÇÃO SEGURA, PORTANTO NÃO DANIFICA AS LENTES COM AS QUAIS ENTRA EM CONTATO. PERMITE IMAGENS MAIS NÍTIDAS E CLARAS POR UM PERÍODO DE TEMPO MAIS LONGO. SECA RAPIDAMENTE APÓS A APLICAÇÃO, PERMITINDO UMA VISÃO MAIS CLARA E OBJETIVA DO CAMPO OPERATÓRIO.

PRECAUÇÕES, RESTRIÇÕES, ADVERTÊNCIAS, CUIDADOS ESPECIAIS E ESCLARECIMENTOS SOBRE O USO DO PRODUTO

- ✓ PRODUTO DE USO EXTERNO.
- ✓ OBSERVAR ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES DE USO.
- ✓ NÃO APLICAR O PRODUTO PRÓXIMO AOS OLHOS, POIS O ÁLCOOL ISOPROPÍLICO É UM IRRITANTE OCULAR MODERADO. CASO HAJA CONTATO COM OS OLHOS, LAVAR IMEDIATAMENTE COM ÁGUA CORRENTE DURANTE 15 MINUTOS, E PROCURAR ORIENTAÇÃO MÉDICA.
- ✓ EVITAR CONTATO COM A PELE.
- ✓ NÃO UTILIZAR O PRODUTO CASO SUA EMBALAGEM ORIGINAL APRESENTE SINAIS DE VIOLAÇÃO OU DATA DE VALIDADE EXPIRADA.
- ✓ ABRIR A EMBALAGEM SOMENTE NO MOMENTO DO USO.
- ✓ PRODUTO ESTERILIZADO EM RAIOS GAMA. ESTERILIDADE ASSEGURADA ENQUANTO A EMBALAGEM NÃO FOR VIOLADA.
- ✓ PRODUTO DE USO ÚNICO. DESCARTAR APÓS O USO EM LOCAL APROPRIADO.

EFEITOS ADVERSOS

NÃO SÃO RELATADOS EFEITOS ADVERSOS AO USO DESTES PRODUTOS. USO EXCLUSIVAMENTE EXTERNO.

CUIDADOS DE ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

MANTER O PRODUTO EM LOCAL FRESCO E SECO, INCLUSIVE DURANTE SUA ARMAZENAGEM E TRANSPORTE, EVITANDO EXPOSIÇÃO AO SOL, POEIRA, UMIDADE E TEMPERATURA ELEVADA.

COMO RECOMENDAÇÃO GERAL É ESPECIFICADO MANTER-SE ENTRE 5°C e 30°C E ENTRE 40% a 75% DE UMIDADE RELATIVA.



FICHA TÉCNICA

FORMAS DE APRESENTAÇÃO DO PRODUTO

SACHÊ TRANSPARENTE INDIVIDUAL CONTÉM UM LENÇO UMEDECIDO CONTENDO 3mL DE SOLUÇÃO. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM ENVELOPE DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM FILME DE POLIÉSTER, DEVIDAMENTE IDENTIFICADO E COM TODAS AS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS PARA SEU USO.

INSTRUÇÕES DE USO

- ✓ ABRIR A EMBALAGEM UTILIZANDO TÉCNICAS USUAIS DE ASSEPSIA;
- ✓ RETIRAR FILME LAMINADO PELO LOCAL INDICADO;
- ✓ ABRIR FILME LAMINADO;
- ✓ REMOVER O LENÇO UMEDECIDO;
- ✓ MOLHAR A SUPERFÍCIE DA LENTE COM O LENÇO UMEDECIDO E DEIXAR SECAR POR APROXIMADAMENTE 2 SEGUNDOS;
- ✓ SEMPRE QUE NECESSÁRIO, MOLHAR A LENTE DA ÓTICA NO LENÇO UMEDECIDO;
- ✓ INTRODUIR ÓTICA NA CAVIDADE ABDOMINAL
- ✓ DESCARTAR APÓS O USO.

FABRICANTE

AMERICAN INSTRUMENTS EIRELI - EPP
ENDEREÇO: AVENIDA 53, 1227 – JARDIM KENNEDY
CEP: 13501-530 – RIO CLARO/ SP
FONE: (19)3531-5100. FAX (19)3531-5109.
CNPJ 06.981.398/0001-21. INDÚSTRIA BRASILEIRA.
AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO K956X0779300
RESPONSÁVEL TÉCNICO: PRISCILA A. BISCARO - CRQ: 04200899