

**FILTRO BACTERIOLÓGICO\_VIRAL**

REGISTRO ANVISA:

80251140033 AI0046 – FILTRO BACTERIOLÓGICO VIRAL

**COMPOSIÇÃO**

CORPO DO FILTRO CONFECCIONADO EM POLIMERO ATOXICO E DE ALTA RESISTENCIA. FILTRO ELETROSTÁTICO EQUIVALENTE HEPA COM MEMBRANA HIGROSCÓPICA E CAPACIDADE DE FILTRAGEM DE PARTÍCULAS DE 0,3µM.

PRODUTO ISENTO DE LÁTEX.

EMBALAGEM INDIVIDUAL.

VOLUME DE FLUXO APROXIMADO ENTRE: 150 A 1500ML

PESO: 26,6G (AI0046)

EFICIÊNCIA DE FILTRAÇÃO VIRAL E BACTERIANA: ATÉ 99,99%

FLUXO DE AR: BIDIRECIONAL

ESPAÇO MORTO: 37ML (AI0044)

RESISTENCIA: 13L/MIN A 30CMH<sub>2</sub>O

**VALIDADE**

24 MESES APÓS A DATA DE ESTERILIZAÇÃO.

**MODELOS**

AI0046 – FILTRO BACTERIOLÓGICO VIRAL

**INDICAÇÃO E FINALIDADE DE USO**

OS FILTROS SÃO INDICADOS PARA USO PROXIMAL AO EQUIPAMENTO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA E ANESTESIA COM FILTRO PROMOVENDO UMA PROTEÇÃO CONTRA CONTAMINAÇÃO CRUZADA.

**NOTA:** TROCAR O DISPOSITIVO EM PERÍODOS NÃO SUPERIORES A 24HRS

**INSTRUÇÕES DE USO**

1. CONECTAR FIRMEMENTE O DISPOSITIVO PRÓXIMO AO RESPIRADOR MECÂNICO. VERIFICAR SE AS CONEXÕES ESTÃO FIRMES. CHECAR SE NÃO HÁ NENHUM VAZAMENTO DE AR ENTRE CONEXÕES.

3. VERIFICAR PERIODICAMENTE O AUMENTO DA RESISTÊNCIA DO FLUXO E CASO SEJA NECESSÁRIO, SUBSTITUIR O DISPOSITIVO.

O DESCARTE DESTE MATERIAL DEVE SER FEITO DE ACORDO COM OS REGULAMENTOS NACIONAIS OU DO HOSPITAL

**PRECAUÇÕES, RESTRIÇÕES, ADVERTÊNCIAS, CUIDADOS ESPECIAIS E ESCLARECIMENTOS SOBRE O USO DO PRODUTO**

NÃO UTILIZAR JUNTO COM UMIDIFICADORES POR AQUECIMENTO DE ÁGUA CONVENCIONAIS.

- OS PACIENTES, QUANDO DO USO DESTE DISPOSITIVO, DEVEM ESTAR SOB VIGILÂNCIA CONSTANTE. CASO SEJAM OBSERVADAS COMPLICAÇÕES, O DISPOSITIVO DEVE SER REMOVIDO OU SUBSTITUÍDO.
- O DISPOSITIVO DEVE SER MUDADO A CADA 24 HORAS OU MAIS FREQUENTEMENTE, CASO SE ACUMULEM SECREÇÕES.
- USO ADULTO E INFANTIL EM CIRCUITO RESPIRATÓRIO OU ANESTESIA, TRATAMENTO INTENSIVO OU CIRURGIA.



## FICHA TÉCNICA

- O OXIGÊNIO APESAR DE NÃO SER INFLAMÁVEL, SUPORTA A COMBUSTÃO. NÃO USAR O DISPOSITIVO PRÓXIMO DE CALOR EXCESSIVO, CHAMAS EXPOSTAS OU OUTRAS FONTES DE IGNIÇÃO.
- SEGUNDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE, ESTE DISPOSITIVO SÓ PODE SER VENDIDO E UTILIZADO SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA.
- O DISPOSITIVO DESTINA-SE AO USO INDIVIDUAL DO PACIENTE E NÃO PODE SER LIMPO E NEM UTILIZADO NOVAMENTE. NÃO ESTERILIZAR. ANTES DE USAR, VERIFICAR SE O FLUXO DE AR ESTÁ DESIMPEDIDO.

### FABRICANTE

AMERICAN INSTRUMENTS EIRELI - EPP  
ENDEREÇO: AVENIDA 53, 1227 - JARDIM KENNEDY  
CEP: 13501-530 - RIO CLARO/ SP  
FONE: (19)3531-5100. FAX (19)3531-5109.  
CNPJ 06.981.398/0001-21. INDÚSTRIA BRASILEIRA.  
AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO K956X0779300  
RESPONSÁVEL TÉCNICO: PRISCILA A. BISCARO - CRQ: 04200899