

PROBE

REGISTRO ANVISA: 80251140056

COMPOSIÇÃO

CABO - ALUMÍNIO
HASTE – AÇO INOX
PONTA ESFÉRICA - POLÍMERO
POSICIONADOR - ALUMÍNIO

TAMANHO:

PROBE RETAL 24MM X 295MM
PROBE VAGINAL 27,5MM X 350MM

VALIDADE

INDETERMINADO
ESTERILIZAÇÃO PELO VAPOR SATURADO - AUTOCLAVE CONVENCIONAL
TEMPERATURA: 132°C TEMPO: 4 MINUTOS

MODELO

AI0021 - PROBE RETAL
AI0022 - PROBE VAGINAL

INDICAÇÃO E FINALIDADE DE USO

AS SONDAS DE VISUALIZAÇÃO RETAL CIRÚRGICA E VAGINAL FORNECEM ORIENTAÇÃO EFICAZ DO CIRURGIÃO. A ADESIÓLISE PÉLVICA COMPLEXA, A ENDOMETRIOSE E OS PROCEDIMENTOS DE HISTERECTOMIA LAPAROSCÓPICA EXIGEM A LOCALIZAÇÃO PRECISA E A VISUALIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS VAGINAL E RETAL. INDICADO PARA AUXILIAR A VISUALIZAÇÃO, IDENTIFICAÇÃO E MAPEAMENTO DO RETO E DA VAGINA.

PRECAUÇÕES, RESTRIÇÕES, ADVERTÊNCIAS, CUIDADOS ESPECIAIS E ESCLARECIMENTOS SOBRE O USO DO PRODUTO

- ✓ O PRODUTO DEVE SER BEM LUBRIFICADO E SÓ ENTÃO INTRODUZIDO NO PACIENTE
- ✓ PRODUTO MÉDICO-HOSPITALAR NÃO ESTÉRIL;
- ✓ O PRODUTO É ATÓXICO E NÃO IRRITANTE, PORTANTO NÃO CAUSA RISCOS PARA QUEM O MANUSEIA E UTILIZA;
- ✓ O PRODUTO É DE USO PERMANENTE, DEVENDO SER SUBMETIDO À ESTERILIZAÇÃO ANTES DE SER UTILIZADO. A ESTERILIZAÇÃO DO MATERIAL NÃO É SUBSTITUÍDA PELA LIMPEZA. UMA VEZ ESTERILIZADO, O INSTRUMENTAL DEVE SER ABERTO SOMENTE EM CONDIÇÕES ASSÉPTICAS;
- ✓ NÃO EXISTEM RESTRIÇÕES PARA O NÚMERO DE VEZES POSSÍVEIS PARA REUTILIZAÇÃO OU RE-ESTERILIZAÇÃO QUE O PRODUTO PODE SER SUBMETIDO, SEMPRE QUE MANTIDAS AS ORIENTAÇÕES ESTABELECIDAS NAS INSTRUÇÕES DE USO;
- ✓ O DESGASTE OU DANO NOS INSTRUMENTOS DEVEM SER INSPECIONADOS PELOS MÉDICOS E EQUIPE DOS CENTROS OPERATÓRIOS ANTES DA CIRURGIA;
- ✓ DEVE-SE TER O MÁXIMO CUIDADO NO PROCESSO DE LIMPEZA, ESTERILIZAÇÃO, ACOMODAÇÃO (ESTOCAGEM), TRANSPORTE E MANUSEIO DO PRODUTO PARA SE EVITAR CHOQUES MECÂNICOS QUE ALTERAM SUA ANATOMIA E PREJUDICAM SUA FUNCIONALIDADE. ANTES DO INÍCIO DA CIRURGIA VERIFICAR O FUNCIONAMENTO DO



FICHA TÉCNICA

PRODUTO. NÃO DEVENDO SER UTILIZADO SE O MESMO APRESENTAR ALTERAÇÕES ANATÔMICAS;

- ✓ MANTENHA AS BOAS TÉCNICAS DE MANIPULAÇÃO SEGURAS QUANDO O PRODUTO ESTIVER EM USO.

MODO DE USO

- ✓ LUBRIFICAR PROBE;
- ✓ INTRODUIZI-LO VIA VAGINAL OU RETAL;
- ✓ AVALIAR VIA VIDEOLAPAROSCÓPICA O TRAJETO DO RETO E/OU DA VAGINA;
- ✓ RETIRAR PROBE NO FINAL DO PROCEDIMENTO;
- ✓ APÓS O USO, O PRODUTO DEVE SER SUBMETIDO A UM PROCESSO DE DESINFECÇÃO E LAVAGEM.

EFEITOS ADVERSOS

NÃO SÃO RELATADOS EFEITOS ADVERSOS AO USO DESTE PRODUTO.

CUIDADOS DE ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

OS PRODUTOS DEVEM SER TRANSPORTADOS E CONSERVADOS EM LOCAL LIMPO, AREJADO, PROTEGIDO DE LUZ SOLAR, FONTES DE CALOR E UMIDADE.

FORMAS DE APRESENTAÇÃO DO PRODUTO

O PRODUTO É ENVOLTO EM PLÁSTICO BOLHA (EMBALAGEM PRIMÁRIA).

MÉTODO DE LIMPEZA RECOMENDADO:

O PROBE NECESSITA ESTAR ESTERILIZADO NO MOMENTO DO USO. APÓS ESTERILIZADO, SEGUIR TÉCNICA ASSÉPTICA PARA MANUSEIO DO PRODUTO.

OS PROBES RETAL E VAGINAL SÃO COMPATÍVEIS COM A MAIORIA DAS SOLUÇÕES DE DESINFECÇÃO E LIMPEZA, COM EXCEÇÃO DAS SEGUINTE SOLUÇÕES: COMPOSTOS FENÓLICOS, QUARTERNÁRIO DE AMÔNIO, HIPOCLORITO E ÁLCOOL.

USAR O PRODUTO SOMENTE QUANDO TODOS OS SEUS COMPONENTES ESTIVEREM INTEGRALMENTE CONSTITUÍDOS, SEM FUROS, QUEBRAS, REBARBAS, DESCONECTADOS OU PRESENÇA DE CORPO ESTRANHO ADERIDO NO MATERIAL.

FABRICANTE

AMERICAN INSTRUMENTS EIRELI - EPP

ENDEREÇO: AVENIDA 53, 1227 – JARDIM KENNEDY

CEP: 13501-530 – RIO CLARO/ SP

FONE: (19)3531-5100. FAX (19)3531-5109.

CNPJ 06.981.398/0001-21. INDÚSTRIA BRASILEIRA.

AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO K956X0779300

RESPONSÁVEL TÉCNICO: PRISCILA A. BISCARO - CRQ: 04200899