

Instrução de Uso Measuring Grid 40 X 70 mm Perforated

SUPPORT IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI – EPP – CNPJ: 00.541.397/0001-29

Avenida 51, 1150 – Jardim Kennedy – CEP: 13501-520 - Rio Claro/SP

Resp. Técnica: Solange do Carmo de Leon Freitas CREA/SP: 5069571530

Visando a praticidade e a facilidade de ter acesso às informações contidas nas Instruções de Uso de nossos produtos, a Support em acordo com a IN nº 4/2012 estabelecida pela ANVISA, disponibiliza os documentos para download no site: http://www.smart.med.br/instrucao_uso

Importante: Verifique a versão da Instrução de Uso indicado no rótulo do produto, juntamente com o número do registro e clique em "Baixar" no documento desejado para iniciar a transferência do arquivo.

Para obter a Instrução de Uso impressa sem custo de emissão e envio, favor entrar em contato com o nosso Serviço ao Consumidor através do telefone +55 (19) 3524-7424 ou pelo e-mail: rt@support.med.br

Registro ANVISA nº 80646960031 - Revisão 00

CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO

Nome Técnico: Outros de Apoio Médico-Hospitalar

Nome Comercial: Measuring Grid 40 X 70 mm Perforated

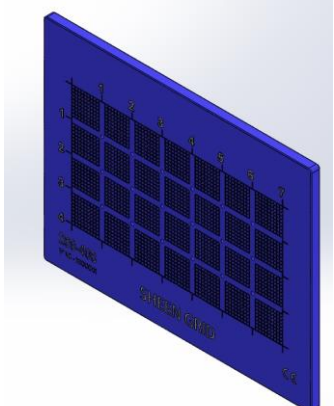
Composição:

Alumínio

Validade: Indeterminada

Método de Esterilização: Vapor Saturado (Autoclave)

IDENTIFICAÇÃO DOS MODELOS COMERCIAIS

Referências	Descrição	Imagem
SM-289408	Measuring Grid 40 X 70 mm Perforated	

Instrução de Uso

Measuring Grid 40 X 70 mm Perforated

FORMA DE APRESENTAÇÃO DO PRODUTO

O produto é embalado individualmente em embalagem m PEBD termo selada e rotulada. **E em seguida acondicionado em caixa de papelão constando todos os dados de identificação, procedência e rastreabilidade.**

INDICAÇÃO E FINALIDADE

Indicado para cortar, medir e fotografar enxertos de cartilagem. Medido em milímetros. Pode ser usado como uma superfície de corte.

PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO/ MECANISMO DE AÇÃO

Utilizadas em cirurgias plásticas reconstrutivas.

MODO DE USO

Posicionar Measuring Grid 40 X 70 mm Perforated sob campo estéril;
Depositar cartilagem na placa;
Medir e furar cartilagem no tamanho desejado.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Dimensional: 3,0 X 70 X 89mm

Peso: 49g

Organolépticas:

Os dispositivos são confeccionados em alumínio na cor azul. Possui graduação na horizontal de 1 a 7 e 1 a 4 na vertical, referência milimétrica de corte.

Físico-químicas e/ou mecânicas:

Os componentes do dispositivo são sólidos, rígidos **de baixa elasticidade e plasticidade.**

Microbiológicas:

Não se aplica

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO, CONSERVAÇÃO, EMBALAGEM E MANIPULAÇÃO

Os produtos devem ser armazenados em local limpo, arejado, protegido de luz solar, fontes de calor e umidade. Evitar locais com umidade e incidência de raios solares para armazenamento.

Os produtos devem ser transportados em local limpo, arejado, protegido de luz solar, fontes de calor e umidade.

Lavagem:

- Utilizar sabão neutro a 1% ou detergente neutro, ambos com pH 7,0.
- Utilizar sempre escovas com cerdas macias naturais ou de nylon para a limpeza.

Instrução de Uso

Measuring Grid 40 X 70 mm Perforated

- Nunca utilizar palhas ou esponjas de aço e produtos abrasivos, para que não se danifiquem os instrumentais em uso.
- A limpeza por ultrassom, se utilizada, deverá ter a solução para lavagem aquecida pelo menos a 45°C. De 3 a 5 minutos de imersão, em uma frequência de 35 quilohertz, é o suficiente para a limpeza. A necessidade de escovamento das partes milimétricas pode ainda ser necessária.

Enxágue:

- Utilizar sempre para o enxágue, água destilada, deionizada ou desmineralizada.
- Nunca utilizar soluções salinas, principalmente hipoclorito de sódio (água sanitária) e soro fisiológico, desinfetantes, água oxigenada, ou álcool para limpeza ou enxágue do cutting board.

Secagem:

- Deixar o instrumento secar de "forma natural" ou utilizar sempre tecido macio e absorvente ou ar comprimido isento de umidade.

Esterilização:

Vapor Saturado - Autoclave Convencional

Temperatura: 132°C

Tempo: 4 minutos

ADVERTÊNCIAS/ PRECAUÇÕES

Não deve sofrer batidas ou quedas. Qualquer produto que tenha caído ou sido inadequadamente manuseado, ou com suspeita de ter sofrido dano, deve ser separado e segregado.

Produto somente para uso profissional familiarizado com a técnica.

Técnica de assepsia deve ser empregada após uso;

Produto não estéril;

A durabilidade é definida até que o produto se mantenha como foi projetado sem quaisquer modificações.

A utilização do dispositivo de modo incorreto, pode causar impacto negativo no desempenho do produto

Seguir sempre as instruções contidas nesta instrução de uso.

CONTRA-INDICAÇÕES

Não adicionar umidade ao produto

A utilização do dispositivo de modo incorreto, pode causar impacto negativo no desempenho do produto.

EFEITOS ADVERSOS

Não se aplica.

A utilização do dispositivo de modo incorreto, pode causar impacto negativo no desempenho do produto.

Instrução de Uso
Measuring Grid 40 X 70 mm Perforated

RECLAMAÇÃO E ATENDIMENTO AO CLIENTE

Todo cliente ou usuário dos produtos Support, que tiver dúvidas ou queira maiores esclarecimentos sobre os produtos oferecidos, poderá entrar em contato com a Support/ Assistência Técnica através dos dados para contato contido nas instruções de uso e rótulos na embalagem do produto.

FABRICADO POR:

SUPPORT IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI – EPP

CNPJ: 00.541.397/0001-29

Avenida 51, 1150 – Jardim Kennedy

CEP: 13501-520 - Rio Claro/SP