

Instrução de Uso Manta Magnética

AMERICAN INSTRUMENTS EIRELI - EPP - CNPJ: 06.981.319/0001-21

Avenida 53, 1227 – Jardim Kennedy – CEP: 13501-530 - Rio Claro/SP - Resp. Téc.:
Priscila Andreoli Biscaro CRQ/SP: 04200899

Visando a praticidade e a facilidade de ter acesso às informações contidas nas Instruções de Uso de nossos produtos, a American Instruments em acordo com a IN nº 4/2012 estabelecida pela ANVISA, disponibiliza os documentos para download no site: <http://www.americaninstruments.com.br/materiais>

Importante: Verifique a versão da Instrução de Uso indicado no rótulo do produto, juntamente com o nº do registro e clique em "Baixar" no documento desejado para iniciar a transferência do arquivo.

Para obter a Instrução de Uso impressa sem custo de emissão e envio, favor entrar em contato com o nosso Serviço ao Consumidor através do telefone +55 (19) 3531-5100 ou pelo e-mail: info@americaninstruments.com.br

Registro ANVISA: ISENTO

RESPONSÁVEL TÉCNICO: PRISCILA A. BISCARO - CRQ: 04200899

CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO

Nome Técnico: Outros de Apoio Médico-Hospitalar

Nome Comercial: Manta Magnética

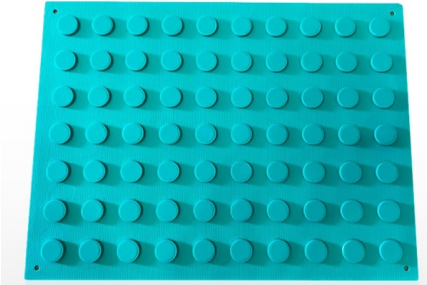
Composição: Silicone

Validade: Indeterminada

Método de Esterilização: Vapor Saturado (Autoclave)

Instrução de Uso Manta Magnética

IDENTIFICAÇÃO DOS MODELOS COMERCIAIS

Referências	Descrição	Imagem
AI0111	Manta Magnética 30 x 40 cm	

FORMA DE APRESENTAÇÃO DO PRODUTO

O produto é embalado individualmente em embalagem PEBD termo selada e rotulada.

E em seguida acondicionado em caixa de papelão constando todos os dados de identificação, procedência e rastreabilidade.

INDICAÇÃO E FINALIDADE

A manta magnética reutilizável fornece uma zona de transferência segura de 'mãos livres' para instrumentos metálicos, reduzindo assim o risco de lesões perfurocortantes causado entre o pessoal da sala de cirurgia e os cirurgiões.

PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO/ MECANISMO DE AÇÃO

As mantas são dispositivos que permitem aos cirurgiões controlar e manipular instrumentos cirúrgicos de forma precisa e segura. Estes dispositivos são projetados para serem usados em ambientes cirúrgicos e podem ser usados para ajudar a guiar instrumentos cirúrgicos, como pinças, alicates e bisturis, para o local correto durante a cirurgia. Os ímãs reduzem o risco dos

Instrução de Uso Manta Magnética

instrumentos caírem do campo estéril. Os ímãs com bordas lisas evitam perfurações do silicone.

Os campos magnéticos reutilizáveis são projetados para serem seguros e eficazes, permitindo que os cirurgiões realizem procedimentos cirúrgicos com precisão e segurança.

INDICACAO DE USO

1. Antes de usar a manta magnética, certifique-se de que ela está limpa, seca e estéril.
2. Coloque a manta magnética sobre a superfície de trabalho.
3. Coloque os instrumentais cirúrgicos sobre a manta magnética.
4. Utilize a manta magnética para segurar os instrumentais cirúrgicos dentro do campo estéril.
5. Após o uso, higienizar a manta magnética antes de armazená-la.
6. A manta magnética deve ser esterilizada antes do uso.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Dimensional: 30 x 40 cm

Peso: 594g

Os dispositivos são confeccionados em silicone na cor verde contendo 70 ímãs redondos para evitar perfurações da borracha.

Isento de Látex.

Instrução de Uso Manta Magnética

CONDIÇÕES ARMAZENAMENTO, CONSERVAÇÃO, EMBALAGEM E MANIPULAÇÃO

Os produtos devem ser armazenados em local limpo, arejado, protegido de luz solar, fontes de calor e umidade. Evitar locais com umidade e incidência de raios solares para armazenamento.

Os produtos devem ser transportados em local limpo, arejado, protegido de luz solar, fontes de calor e umidade.

Inspecionar a manta para garantir se não está danificada, funcionando corretamente e sem áreas rasgadas.

Lavagem:

- Utilizar sabão neutro a 1% ou detergente neutro, ambos com pH 7,0.
- Utilizar sempre escovas com cerdas macias naturais ou de nylon para a limpeza.
- Nunca utilizar palhas ou esponjas de aço e produtos abrasivos, para que não se danifiquem os instrumentais em uso.
- A limpeza por ultrassom, se utilizada, deverá ter a solução para lavagem aquecida pelo menos a 45°C. De 3 a 5 minutos de imersão, em uma frequência de 35 quilohertz, é o suficiente para a limpeza. A necessidade de escovamento das partes milimétricas pode ainda ser necessária.

Enxágue:

- Utilizar sempre para o enxágue, água destilada, deionizada ou desmineralizada.
- Nunca utilizar soluções salinas, principalmente hipoclorito de sódio (água sanitária) e soro fisiológico, desinfetantes, água oxigenada, ou álcool para limpeza ou enxágue do tapete.

Secagem:

- Deixar o instrumento secar de “forma natural” ou utilizar sempre tecido macio e absorvente ou ar comprimido isento de umidade.

Instrução de Uso Manta Magnética

Esterilização:

- Para a esterilização a vapor, o processo deve ser realizado utilizando um ciclo de esterilização a vapor validado.

Vapor Saturado - Autoclave Convencional

Temperatura: 132°C

Tempo: 4 minutos

ADVERTÊNCIAS/ PRECAUÇÕES

Recomenda-se o uso da manta magnética para os instrumentos mais utilizados.

Produto somente para uso profissional familiarizado com a técnica.

Técnica de assepsia deve ser empregada após uso;

Produto não estéril;

A durabilidade é definida até que o produto se mantenha como foi projetado sem quaisquer modificações.

A utilização do dispositivo de modo incorreto, pode causar impacto negativo no desempenho do produto.

Determinados instrumentos podem ser magnetizados.

O armazenamento da Manta Magnética deve ser em local seco com temperatura ambiente. Não expor diretamente a luz solar.

Não utilizar a Manta Magnética durante as operações em pacientes que possuem marca-passo. Os ímãs podem causar efeitos colaterais/mau funcionamento entre os dois produtos.

CONTRA-INDICAÇÕES

Não adicionar umidade ao produto

A utilização do dispositivo de modo incorreto, pode causar impacto negativo no desempenho do produto.

EFEITOS ADVERSOS

Não se aplica.